



Instrukce pro čištění a sterilizaci mikrotitračních aplikátorů

CryoPen® 0+

Čištění a dezinfekce mikrotitračních aplikátorů Cryopen® 0+

Upozornění: CryoPen® 0+ a jejich mikrotitrační aplikátory nejsou určeny k ponoření do kapalin.

Postup:

- Namočte utěrku v nekorozivním dezinfekčním roztoku.
- Sejměte uzávěr aplikátoru.
- Přiložte mokrou utěrku na povrch špičky aplikátoru. Doporučená doba kontaktu je 1 až 5 min.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce dezinfekčního prostředku pro jeho koncentraci a dobu aplikace.

Sterilizace mikrotitračních aplikátorů Cryopen® 0+

Upozornění: CryoPen® 0+ a jejich mikrotitrační aplikátory nejsou určeny k ponoření do kapalin.

Mikrotitrační aplikátory CryoPen® 0+ mohou podstoupit proces sterilizace parou. Nejčastěji používané teploty sterilizace párou jsou 121 °C a 134 °C. Tyto teploty, případně další podobně vysoké teploty vhodné pro usmrcení mikroorganismů, by měly být udržovány pouze po minimální dobu. Doporučené doby expozice pro sterilizaci zabaleného zdravotnického materiálu jsou:

- 18 minut při 134 °C v parním vakuovém sterilizátoru
- 30 minut při 121 °C v parním sterilizátoru s gravitačním odvodu

Postup:

- Opatrně sejměte aplikátor z CryoPen® 0+.
- Sundejte také uzávěr aplikátoru.
- Položte uzávěr aplikátoru a aplikátor na jejich větší základnu do příslušných zásobníků / košů sterilizátoru.
- Postupujte podle pokynů v příručce dodaných výrobcem sterilizátoru a spusťte proces sterilizace.





Instrukcie na čistenie a sterilizáciu mikrotitračných aplikátorov

CryoPen® o+

Čistenie a dezinfekcia mikrotitračných aplikátorov CryoPen® o+

Upozornenie: CryoPen® o+ a ich mikrotitračné aplikátory nie sú určené na ponáranie do kvapalín.

Postup:

- Namočte utierku do nekorozívneho dezinfekčného roztoku.
- Zložte uzáver aplikátora.
- Priložte mokrú utierku na povrch špičky aplikátora. Odporúčaná doba kontaktu je 1 až 5 min.
- Vždy dodržiavajte odporúčania výrobcu dezinfekčného prostriedku týkajúce sa jeho koncentrácie a doby aplikácie.

Sterilizácia mikrotitračných aplikátorov CryoPen® o+

Upozornenie: CryoPen® o+ a ich mikrotitračné aplikátory nie sú určené na ponáranie do kvapalín.

Mikrotitračné aplikátory CryoPen® o+ môžu podstúpiť proces sterilizácie parou. Najčastejšie používané teploty sterilizácie parou sú 121 °C a 134 °C. Tieto teploty, prípadne ďalšie podobne vysoké teploty vhodné na usmrtenie mikroorganizmov, by mali byť udržiavané iba po minimálnu dobu. Odporúčané doby expozície na sterilizáciu zabaleného zdravotníckeho materiálu sú:

- 18 minút pri 134 °C (273,2 °F) v parnom vákuovom sterilizátore
- 30 minút pri 121 °C (250 °F) v parnom sterilizátore s gravitačným odvzdušnením

Postup:

- Opatrne zložte aplikátor z CryoPen® o+.
- Zložte tiež uzáver aplikátora.
- Položte uzáver aplikátora a aplikátor na ich väčšiu základňu do príslušných zásobníkov / košov sterilizátora.
- Postupujte podľa pokynov v príručke dodanej výrobcom sterilizátora a spustíte proces sterilizácie.

